

# Paracetamol

## ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Li - heparine (groen)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	Serumtube (rood)
<b>Staal type:</b>	Plasma of serum
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 mL
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	1 dag
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	7 dagen
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	6 maanden
<b>Bijsluiter:</b>	<a href="#">acet2_2024-05_v7.pdf</a>

## ▼ Referentiewaarden

<b>Referentiewaarde:</b>	10 - 30 mg/L
<b>Eenheden:</b>	mg/L
<b>Bron referentiewaarde:</b>	Bijsluiter Roche

## ▼ Interpretatie

### Klinische interpretatie:

Toxiciteit wordt voorspeld in functie van de tijd na inname.  
Plasmaspiegels kunnen slechts geïnterpreteerd worden vanaf 4 uur na inname.

- Concentratie 4 uur na inname:  
75 - 100 mg/L: niet ernstige intoxicatie  
100 - 300 mg/L: matige intoxicatie  
> 300 mg/L: ernstige intoxicatie
- Indien tijdstip van inname niet gekend:  
t 1/2 berekenen aan de hand van twee afnames.  
indien t 1/2 > 4 uur: risico op hepatotoxiciteit.

## ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AZ Sint-Maria Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. Biol. A Schallier
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	3 uur
<b>Toestel:</b>	Cobas 6000
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Therapeutische monitoring

## ▼ Tarificatiegegevens

**Loinc code:** 3298-7

### ▼ Tarief ambuland

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	547212
<b>B-waarde:</b>	400
<b>Prijs:</b>	3.18

### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	547223
<b>B-waarde:</b>	400

**Prijs:** 3.18

▼ **Analysegegevens**

**Minimum volume test:** 2 mL  
**Labo aanvraagnummer:** 3730  
**Labo verkort nummer:** PCTM  
**Medidoc code:** 63109L.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/node/599?auth=1>