

Occult bloed in faeces

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Stoelgangpotje
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Faeces
Minimale hoeveelheid:	5 g
Afname condities:	
Bewaring:	Koelkast
Transport condities:	
Stabiliteit (KT):	2 uur
Stabiliteit (4°C):	5 dagen
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

De iFOBT is een immunologische test die op basis van antigeen-antistof binding humaan hemoglobine detecteert in stoelgang.

De iFOBT detecteert uitsluitend intact humaan hemoglobine, waardoor dierlijk hemoglobine (rood vlees) niet interfereert met de test.

Er is ook geen interferentie door vitamine C en er zijn geen dieetmaatregelen vereist alvorens het staal af te nemen. Hemorroiden of menstruatie kunnen het testresultaat wel vals positief beïnvloeden.

De test is geschikt voor detectie van occult bloed bij screening naar colorectale tumoren.

Daar hemoglobine in het maagdarmkanaal wordt afgebroken, is de iFOBT niet geschikt voor screening naar hoge gastro-intestinale (maag, duodenum) tumoren.

De test kan evenwel ook positief zijn ingeval van aanwezigheid van bloed in de stoelgang ten gevolge van andere goedaardige oorzaken, voornamelijk bij patiënten onder anticoagulerende therapie.

Het is daarom aangewezen een positief resultaat verder te investigeren met colonoscopie.

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. biol. M. Van Gysel
Uitvoerfrequenties:	Dagelijks
Maximum antwoordtijd:	1 dag
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier; bacteriologie

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambulante

RIZIV nomenclatuurnummer:	125716
B-waarde:	50
Prijs:	0.40

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	125720
B-waarde:	50
Prijs:	0.40

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:

Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	5 g
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	OCCB.FEC
Medidoc code:	13625A.F

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/occult-bloed-faeces?auth=1>