



Instructies afname keelwisser

I. Indicatie

- diagnose van een keelontsteking
- opsporen van kiemdragers in kader van ziekenhuishygiënistische maatregelen

II. Patiëntvoorbereiding

Een correcte patiëntidentificatie d.m.v. actieve bevraging naar naam en geboortedatum gaat vooraf aan de staalname.

Staalidentificatie :

Maak voor gehospitaliseerde patiënten gebruik van het scanningsysteem en monsteretiketten afgedrukt via Cyberlab.

Bij ambulante patiënten dient de volledige naam en geboortedatum op het staal te worden vermeld. Externe artsen die gebruik maken van Cyberlab order entry kunnen gebruik maken van de door ons geleverde barcode-etiketten ter identificatie.

III. Benodigdheden

- houten tongspatel
- steriele wisser in transportmedium: eSwab

IV. Staalcollectie

Druk met behulp van de houten spatel de tong naar beneden en wrijf, onder goede belichting, met de wisser een aantal keer over de verdachte plaatsen (ontstoken tonsillen of ulceraties), zonder hierbij met de wisser de tong, de wangen of het tandvles te raken. Witte plaques ter hoogte van de keelamandelen zijn de uitgelezen plaatsen om Streptococcus pyogenes te isoleren.


V. Staalbewaring

Gelieve het staal zo snel mogelijk naar het labo te brengen. In afwachting van het transport kan het staal in de frigo worden bewaard.

Bewaring gedurende maximaal 24 uur bij 2 tot 8°C is toegestaan.

VI. Referentie

A guide to specimen management in clinical microbiology (2nd edition). ASM Press (1999)

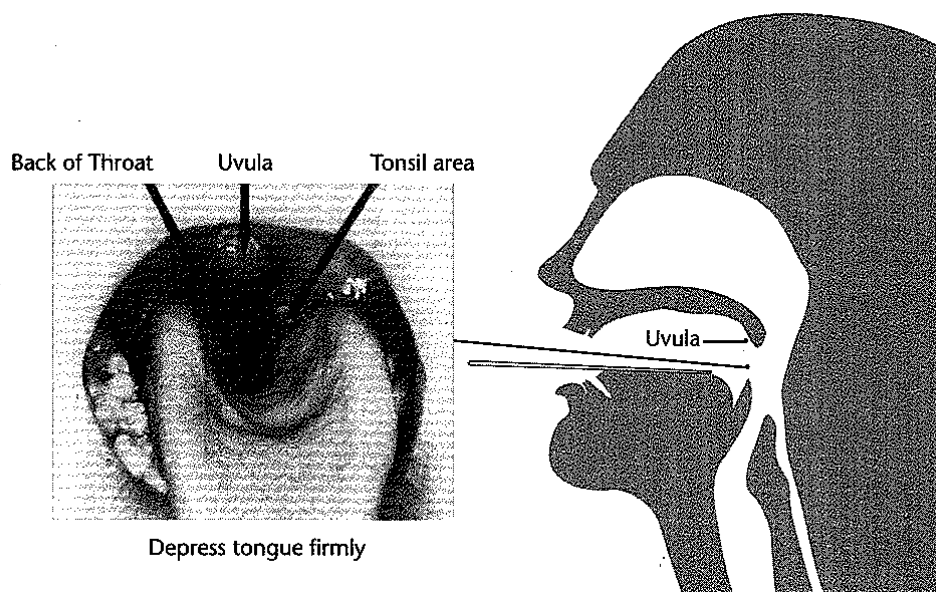

Figuur: Afbeelding keelholte