



Instructies afname weefselbiopt

I. Indicatie

Diagnose van infecties van diepe weefsels (waarvoor staalname d.m.v. heelkundige ingreep)

II. Patiëntvoorbereiding

Een correcte patiëntidentificatie d.m.v. actieve bevraging naar naam en geboortedatum gaat vooraf aan de staalname.

Staalidentificatie :

Maak voor gehospitaliseerde patiënten gebruik van het scanningsysteem en monsteretiketten afgedrukt via Cyberlab.

Bij ambulante patiënten dient de volledige naam en geboortedatum op het staal te worden vermeld. Externe artsen die gebruik maken van Cyberlab order entry kunnen gebruik maken van de door ons geleverde barcode-etiketten ter identificatie.

III. Benodigheden

- Een steriel recipiënt met schroefdeksel.
- Eventueel steriel fysiologisch water

IV. Staalcollectie

- Bezorg zoveel mogelijk weefsel; een wisser is geen geschikt staal.
- Laat het staal niet uitdrogen: indien u over voldoende weefsel beschikt, volstaat het om het staal meteen naar het labo te brengen. Indien u over weinig weefsel beschikt, is het aangewezen het staal te bevochtigen met enkele druppels steriel fysiologisch water teneinde uitdroging van het staal tegen te gaan.

V. Staalbewaring

Het staal dient onmiddellijk naar het labo te worden gebracht om uitdroging te voorkomen.

VI. Referentie

A guide to specimen management in clinical microbiology (2nd edition). ASM Press (1999)